



## INSTRUCTIONS FOR USE

### Brugsanvisning

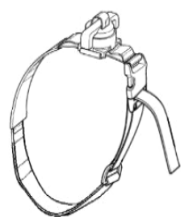


#### 1. Remove From Case

Tag årepresen ud af æsken

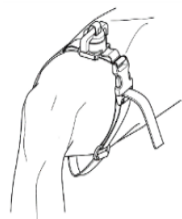

#### 2. Slide Over Limb

Før den over legemsdelen

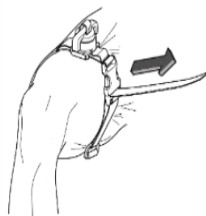

#### 3. Pull Strap Tight

Stram remmen



#### 4. Twist Handle Clockwise Until Blood Flow Ceases

Drej håndtaget med uret, indtil blødningen standser




#### 5. Squeeze Buckle to Release

Klem spændet sammen for at frigøre det

## INSTRUCTIONS FOR TRAPPED LIMB

Anvisninger for en indeklemmt legemsdel

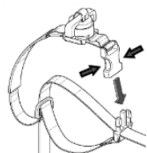


#### 1. Squeeze Quick Release Buckle and Separate

Klem spændet til hurtig frigørelse sammen, og adskil det




#### 2. Wrap Around Trapped Limb and Reconnect Quick Release Buckle

Anbring årepresen omkring den indeklemte legemsdel, og fastgør spændet til hurtig frigørelse igen

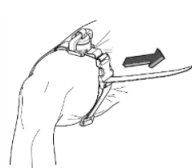

#### 3. Pull Strap Tight and Continue With Step 4 Above

Stram remmen, og fortsæt med trin 4 herover

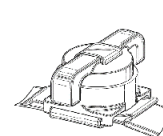

1. Årepresen nulstilles ved at klemme spændet til hurtig frigørelse sammen. Hold bunden i den ene hånd, og løft den øverste del op fro at frigøre tænderne



2. Drej mod uret, indtil alle snoninger er fjernet. Træk i remmene i begge sider for at fastgøre håndtaget