



## INSTRUCTIONS FOR USE

### Návod na používanie

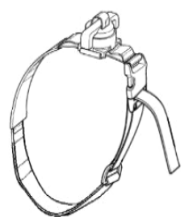


#### 1. Remove From Case

Vyberte z puzdra.

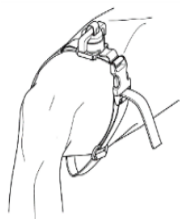

#### 2. Slide Over Limb

Natiahnite cez končatinu.

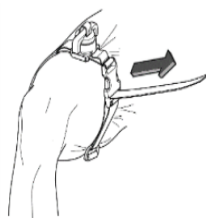

#### 3. Pull Strap Tight

Pevne pritiahnite popruh.



#### 4. Twist Handle Clockwise Until Blood Flow Ceases

Otočte rukoväť v smere hodinových ručičiek až do zastavenia toku krvi.




#### 5. Squeeze Buckle to Release

Stlačte sponu na uvoľnenie.

## INSTRUCTIONS FOR TRAPPED LIMB

### Pokyny pre uchytenú končatinu

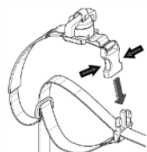


#### 1. Squeeze Quick Release Buckle and Separate

Zatlačte sponu na rýchle uvoľnenie a odpojte ju.




#### 2. Wrap Around Trapped Limb and Reconnect Quick Release Buckle

Omotajte okolo zachytenej končatiny a znova pripojte sponu na rýchle uvoľnenie.

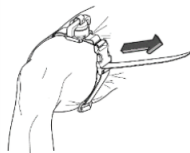

#### 3. Pull Strap Tight and Continue With Step 4 Above

Pevne potiahnite popruh a pokračujte krokom 4 vyššie.

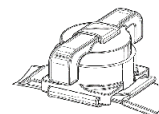

#### 1. Ak chcete škrtidlo nastaviť nanovo, stlačte sponu na rýchle uvoľnenie. Držte základňu v jednej ruke a zdvihnite ju hore, aby ste uvoľnili zuby.



#### 2. Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, kým neodstránite všetky skrútenia. Potiahnite popruhy z oboch strán, aby ste znova nasadili rukoväť.