


## INSTRUCTIONS FOR USE

### Instrucciones de uso

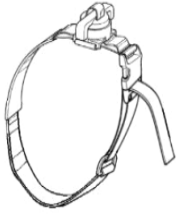


#### 1. Remove From Case

Saque el torniquete de la caja



#### 2. Slide Over Limb

Colóquelo alrededor de la extremidad

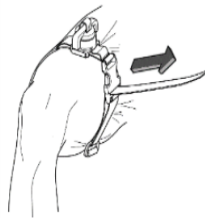

#### 3. Pull Strap Tight

Tire de la correa para apretarlo



#### 4. Twist Handle Clockwise Until Blood Flow Ceases

Gire la rueda en el sentido de las agujas del reloj hasta que se interrumpa el flujo de sangre




#### 5. Squeeze Buckle to Release

Presione las pestañas de la hebilla para abrirla


## INSTRUCTIONS FOR TRAPPED LIMB

### Instrucciones para bloquear extremidades

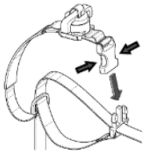


#### 1. Squeeze Quick Release Buckle and Separate

Presione las pestañas de la hebilla de desenganche rápido para soltar el torniquete

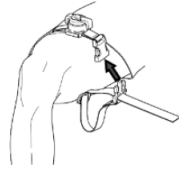


#### 2. Wrap Around Trapped Limb and Reconnect Quick Release Buckle With Step 4 Above

Colóquelo alrededor de la extremidad que quiere bloquear y vuelva a cerrar la hebilla de desenganche rápido

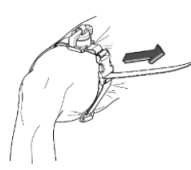

#### 3. Pull Strap Tight and Continue With Step 4 Above

Tire de la correa para apretarlo y siga con el paso 4 anterior

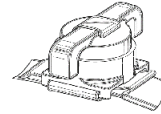

## TOURNIQUET RESET INSTRUCTIONS

### Instrucciones para reajustar el torniquete

1. Para reajustar el torniquete, presione las pestañas de la hebilla de desenganche rápido. Sostenga la base de la rueda con una mano y levante la parte superior para soltar los dientes



2. Gire la rueda en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que llegue al tope. Tire de las correas por ambos lados para reajustar la rueda